

000/0060.042/20



## Coohy Fingertip, pansement refroidissant avec Hydrogel.

Coohy Fingertip est un pansement non-collant avec compresse Hydrogel riche en eau. Le pansement innovateur crée un refroidissement continu et unique: cooling all around. Convient à l'usage dans l'industrie agro-alimentaire vu la couleur bleue et la bande métallique détectable.



### Propriétés

Dimensions 9.5 x 13.5 cm. Pansement bleu élastique. L'Hydrogel refroidit la peau échauffée, calme ainsi la douleur et absorbe le suintement excédentaire. L'action refroidissante se fait par:

Ø L'écart de température entre le gel et la peau. La température du gel de 31°C refroidit et calme la peau échauffée..

Ø L'eau du gel a une capacité d'échauffement, c'est-à-dire que le gel a besoin d'énergie thermique pour augmenter de température afin d'atteindre celle du corps. Ce processus prend environ 30 à 45 minutes et a comme résultat que le gel continue à être froid au toucher.

Ø Même si le Coohy Fingertip a une température de 31°C, l'eau du gel peut s'évaporer. Dans ce cas également, le gel a besoin d'énergie thermique et celle-ci provient de la peau. Voilà pourquoi le Coohy Fingertip continue à être froid au toucher plusieurs heures après son application.


Modèle innovateur, spécifiquement développé pour les doigts et leurs extrémités. Le pansement innovateur garantit un refroidissement continu du doigt entier: cooling all around. Modèle déposé par MExT. Radiodétectable. Hypoallergénique. Peut être enlevé sans douleur. Produit à usage unique.

## Applications

- Pour soigner: les coupures et écorchures peu exsudatives, les brûlures du premier degré,
- la peau échauffée et déshydratée. NE convient PAS pour des plaies saignant abondamment ni pour des plaies profondes ou infectées. NE convient PAS pour des brûlures du deuxième et troisième degré.

## Utilisation

- Appliquer un doigtier MExT bleu au dessus de Coohy Fingertip pour protéger de l'eau et des micro-organismes.
- Dès que l'action refroidissante a disparu, appliquer une pommade nourrissante et apaisante sur la peau brûlée ou irritée (par exemple Flamex) ou appliquer un nouveau pansement Coohy Fingertip pour prolonger la phase de refroidissement.

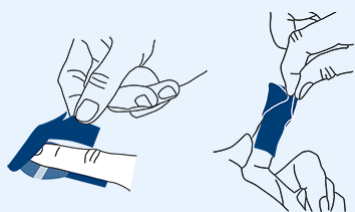

## Contenu

- 6 unités.

## Préservation

- A conserver à température ambiante et à l'abri de l'humidité.
- Date d'expiration: 36 mois après la date de fabrication.
- Voir emballage individuel.

Coohy Fingertip est un dispositif médical.

**Version: 20/04/2024**